


HydroClean[®] advance

Pansement irrigo-absorbant unique⁽¹⁾

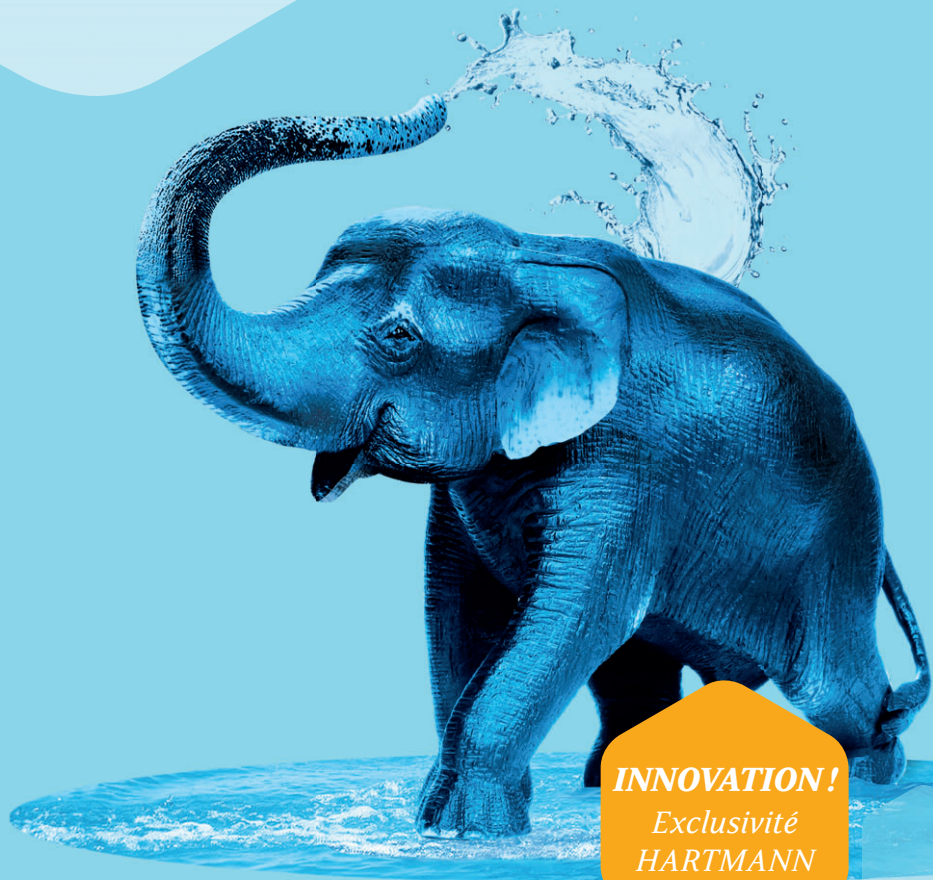

INNOVATION!

*Exclusivité
HARTMANN*

Hydro**Therapy**
Efficacité. Et Simplicité.



HydroClean[®] advance

Une Solution efficace grâce au mécanisme irrigo-absorbant unique^[1]



- Élimine en douceur les **tissus nécrotiques** et la fibrine par détersion autolytique^[1]
- Réduit la charge bactérienne et le risque infectieux^{[2] [3]}
- Stimule la formation du tissu de granulation^[2]
- Minimiser les odeurs^[2]

Quels bénéfices d'utilisation ?

HydroClean[®] advance : Simple à appliquer

- Favorise le retrait **indolore**^[1]
- Ne glisse pas
- **Très conformable**
- Peut être associé à un traitement de **compression**

Différentes formes et tailles disponibles selon les plaies

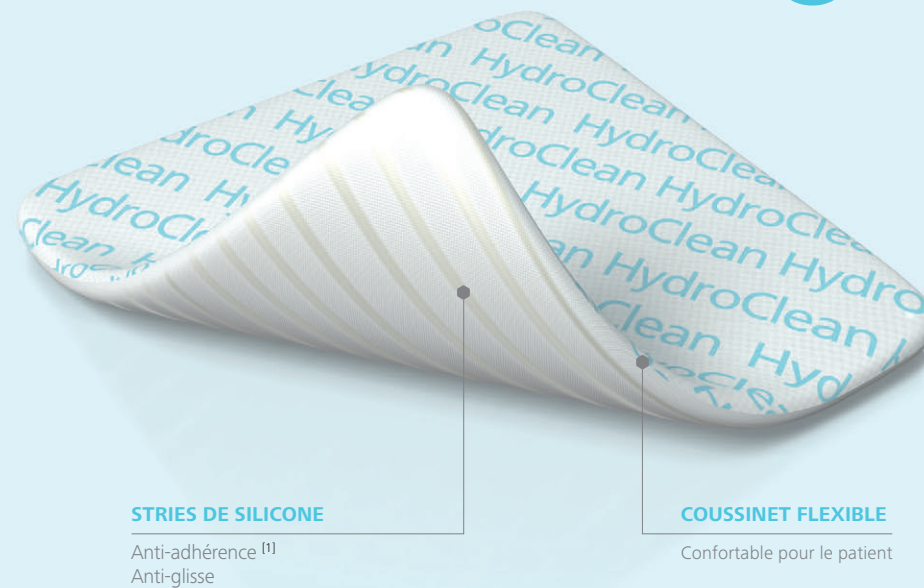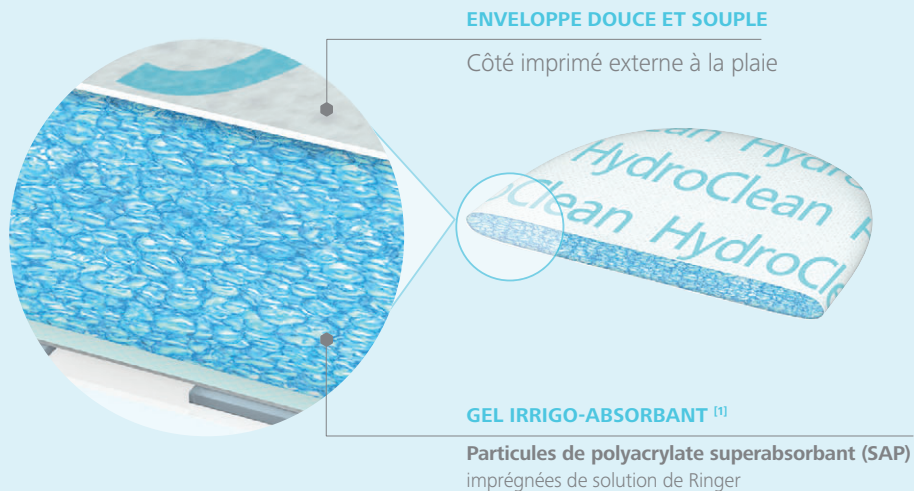


HydroClean[®] advance

Pour quelles indications ?

Pour toutes les plaies chroniques et traumatiques planes qui nécessitent une déterision.^[1]

Vos confrères l'ont testé...

Résultats des 1^{ers} tests :

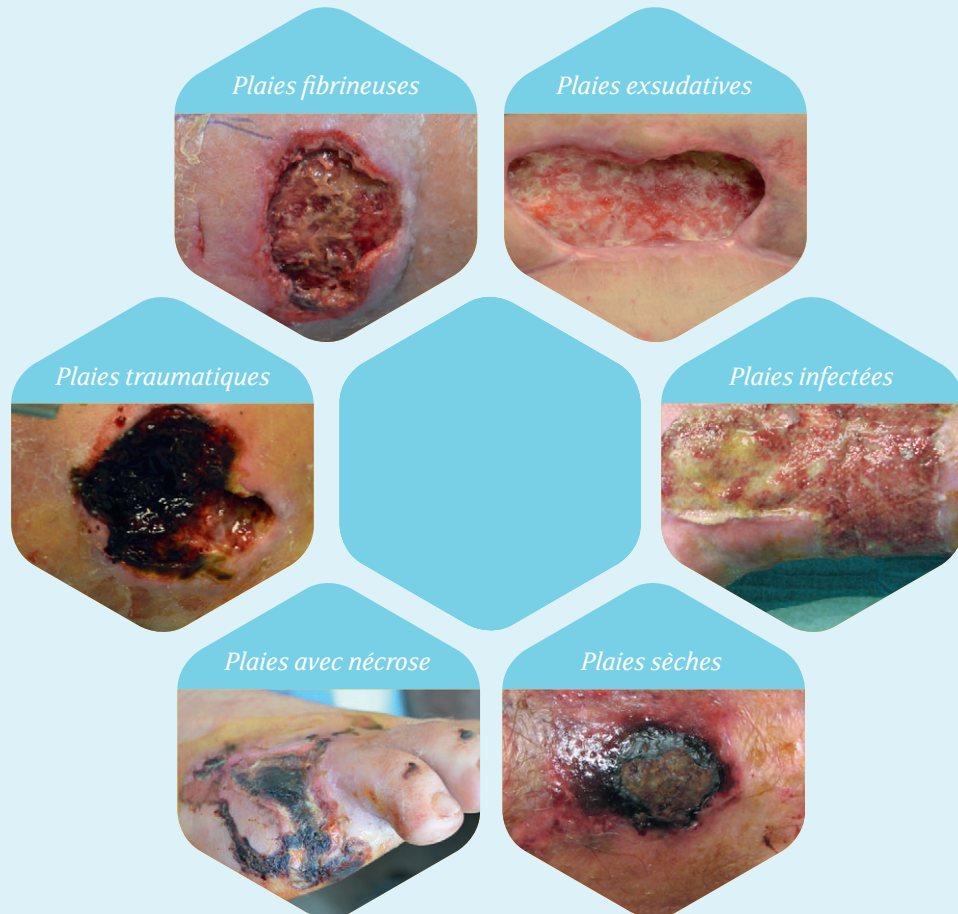

82 %


des soignants satisfaits de sa capacité à déterger tout type de plaie^[4]

Environ **99 %** des soignants satisfaits de sa facilité d'application^[4]

98 % des soignants satisfaits de sa conformabilité / flexibilité^[4]

HydroClean® advance

Plaies planes, peu profondes

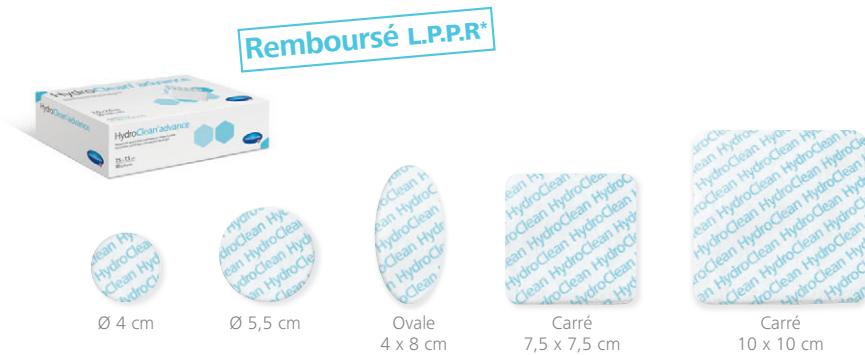

Tailles	Ø 4 cm	Ø 5,5 cm	Ovale 4 x 8 cm	Carré 7,5 x 7,5 cm	Carré 10 x 10 cm
EAN	4052199242668	4052199242743	4052199242705	4052199242200	4052199242330
ACL	6004059	6004060	6004061	6004062	6004063
Boîte de	10	10	10	10	10

* Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr

Mode d'action du pansement irrigo-absorbant




Renouvellement conseillé toutes les 24 heures



1. Libère de la solution de Ringer^[1]



2. Simultanément, absorbe nécrose, fibrine, exsudats chargés de bactéries, levures et protéines inhibitrices de la cicatrisation^[2]

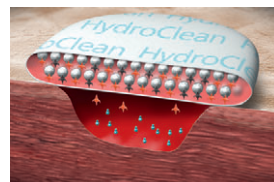

3. Relance le processus de cicatrisation^[1]

Nos recommandations :

- En cas de plaies fortement exsudatives : associer HydroClean® advance et RespoSorb® Silicone



- Réaliser un geste de déterersion mécanique : associer MediSet® Pansement Déterersion à HydroClean® advance





Téléchargez gratuitement notre application smartphone


« Quel pansement pour quelle plaie ? »

Disponible sur :  

En flashant ce code



Pour toutes informations techniques

contactez notre infirmière conseil au :  **N° Vert 0 800 17 37 57**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Et visitez également notre site : www.hartmann.fr

(1) Notice d'emploi HydroClean® advance (05-2015) 35 235. (2) BP Mwipatayi, D Angel, P Dixon, S Higgins, G Gregory & K Sieunarine. Clinical experiences with activated polyacrylate dressings (Tenderwet 24®). Primary Intentions 2005; 13(2): 69-74. HydroClean® et HydroClean® advance ont une structure, une composition et un mode d'action identiques. (3) Bruggiser R. et al. Bacterial and fungal absorption properties of a hydrogel dressing with a superabsorbent polymer core. J of Wound Care. 2005 ; 4 (9) : 438-42. HydroClean® et HydroClean® advance ont une structure, une composition et un mode d'action identiques. Les résultats de cette étude ne préjugent pas des résultats chez l'Homme. (4) Enquête observationnelle HydroClean® advance effectuée par 52 soignants sur 76 patients (22-04-2016)
HydroClean® advance : DM de classe IIb – Fabricant : PAUL HARTMANN AG – Organisme notifié : CE 0123.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou sur l'étiquetage). Remboursés par les organismes d'assurance maladie : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr. Date de création : Novembre 2016.

PAUL HARTMANN S.A.
9, Route de Sélestat Châtenois
67607 SELESTAT CEDEX
France

Téléphone : +33 (0)3 88 82 43 43
Fax : +33 (0)3 88 82 44 65
www.hartmann.fr

Hydro**Therapy**
Efficacité. Et Simplicité.

