

Hydralin Confort Vaginal™



Gel Vaginal Hydratation & Confort

Mode d'emploi :

Lisez attentivement ces informations avant de commencer à utiliser HydralinConfortVaginal™.

Ne jetez pas cette notice. Elle contient des informations importantes.

Si vous avez des questions sur HydralinConfortVaginal™, veuillez les poser à votre médecin, votre pharmacien ou au distributeur.

1. Qu'est-ce que HydralinConfortVaginal™ et à quoi sert-il ?

HydralinConfortVaginal™ est un gel hydratant non hormonal, translucide et incolore qui soulage rapidement et durablement la sécheresse vaginale ainsi que les autres symptômes de l'atrophie vaginale, tels que les brûlures et les démangeaisons. Grâce à l'ectoïne, molécule de protection cellulaire 100% d'origine naturelle, HydralinConfortVaginal™ stabilise les membranes cellulaires de la muqueuse vaginale, maintient l'hydratation et soutient le processus de régénération des muqueuses. HydralinConfortVaginal™ est recommandé pour le traitement des premiers symptômes d'inconfort vaginal dès leur apparition. HydralinConfortVaginal™ convient à un usage quotidien et peut être utilisé en association avec des traitements hormonaux systémiques (THS - traitement hormonal substitutif / THM - traitement hormonal de la ménopause).

2. Avertissements et précautions d'emploi

- HydralinConfortVaginal™ ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'ectoïne, au propylène glycol ou à l'un des autres ingrédients du gel.
- Si des réactions allergiques surviennent, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit.
- Ne pas utiliser en cas de traumatismes ou d'interventions chirurgicales au niveau de la zone vaginale.
- Ne pas utiliser en cas d'infections vulvovaginales.
- Pour éviter tout risque de contamination, ce produit ne doit être utilisé que par une seule et même personne.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser plus de 3 mois après ouverture.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé. Avant chaque application, l'intégrité de l'applicateur doit être soigneusement vérifiée. Ne pas utiliser l'applicateur s'il est endommagé (par exemple s'il présente des fissures ou des éclats visibles) ou si son piston est desserré et se démonte facilement du tube.

- HydralinConfortVaginal™ ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles.
- HydralinConfortVaginal™ n'est pas un spermicide, et ne favorise pas la conception. Il n'a aucune action contraceptive et ne peut pas être utilisé pour empêcher une grossesse.
- Ne pas utiliser l'applicateur intravaginal pendant la grossesse.

3. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HydralinConfortVaginal™ ?

Il n'existe aucune donnée disponible sur les interactions entre HydralinConfortVaginal™ et d'autres produits appliqués par voie vaginale. Par conséquent, l'utilisation conjointe avec des tampons ou des ovules vaginaux n'est pas recommandée.

HydralinConfortVaginal™ est compatible avec tous les types de préservatifs (latex naturel, polyisoprène, polyuréthane).

4. Comment utiliser HydralinConfortVaginal™ ?

Utilisez toujours HydralinConfortVaginal™ conformément à cette notice d'utilisation. Sauf indication contraire de votre médecin ou de votre pharmacien, HydralinConfortVaginal™ peut être appliqué une fois par jour, de préférence le soir, au moins 1 heure avant le coucher (si nécessaire, utilisez des protège-slips). HydralinConfortVaginal™ peut être utilisé moins souvent (à un/deux/trois jours d'intervalle). Lavez vous soigneusement les mains et gardez-les propres jusqu'à l'application. L'application du gel froid peut provoquer une sensation désagréable. Avant utilisation, assurez-vous que le tube est intact et à température ambiante.

Sans applicateur : une quantité suffisante de gel doit être prélevée sur un doigt propre et appliquée en massant doucement la zone génitale externe et/ou l'intérieur du vagin.

Avec applicateur :

- Tenez le tube à la verticale, côté ouverture vers le haut, et ouvrez-le. Mettez/vissez l'applicateur intravaginal au niveau de l'ouverture du tube.
- Pressez soigneusement le tube jusqu'à ce que le piston de l'applicateur s'arrête et que l'applicateur soit rempli de gel. Retirez l'applicateur du tube en tirant/dévisant soigneusement et refermez le tube.
- Trouvez une position confortable pour introduire l'applicateur dans le vagin (par exemple allongée sur le dos) et insérez soigneusement l'applicateur dans le vagin.

- Appuyez doucement sur le piston de l'applicateur jusqu'à ce qu'il s'arrête et que tout le gel soit libéré dans le vagin.
- Enfin, retirez l'applicateur du vagin. L'applicateur doit être soigneusement nettoyé après chaque utilisation.

Pour nettoyer l'applicateur :

- Démontez l'applicateur en retirant le piston du corps de l'applicateur. Pour ce faire, le piston doit être poussé fortement avec l'extrémité sphérique du piston sur une surface dure.
- Lavez les différentes parties de l'applicateur (le corps de l'applicateur et le piston) avec de l'eau tiède du robinet et du savon doux, rincez-les soigneusement avec de l'eau du robinet, et si nécessaire, secouez-les pour enlever l'excédent d'eau.
- Laissez sécher les différentes parties de l'applicateur à l'air libre sur une surface sèche et propre.
- Remontez l'applicateur en insérant le piston dans le corps de l'applicateur.

Ne pas utiliser le même applicateur plus de 20 fois.

5. Effets secondaires éventuels de HydralinConfortVaginal™

HydralinConfortVaginal™ est bien toléré. Jusqu'à présent, aucun effet secondaire régulier ou persistant n'est connu.

Dans des cas isolés, des sensations locales de brûlures ou de démangeaisons à court terme, ainsi qu'une légère augmentation des pertes vaginales normales, peuvent survenir.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou le distributeur du produit si vous remarquez des effets secondaires liés à l'utilisation de HydralinConfortVaginal™.

Si ces symptômes persistent ou s'aggravent, ou si des signes d'infection (comme des pertes vaginales d'une couleur/consistance/odeur inhabituelle) apparaissent, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

6. Comment conserver HydralinConfortVaginal™ ?

La date de péremption de HydralinConfortVaginal™ est imprimée sur la boîte ainsi que sur le produit lui-même. HydralinConfortVaginal™ ne doit pas être utilisé après la date de péremption.

Conserver HydralinConfortVaginal™ entre 2°C et 25°C.

7. Informations supplémentaires

Tous les excipients de HydralinConfortVaginal™ n'ont pas fait l'objet d'études approfondies quant à leur sécurité pendant la grossesse et l'allaitement. En l'absence de données suffisantes, l'utilisation de HydralinConfortVaginal™ pendant la grossesse et pendant l'allaitement est déconseillée.

Les patients incapables d'utiliser HydralinConfortVaginal™ par eux-mêmes doivent être assistés lors de l'application de HydralinConfortVaginal™. HydralinConfortVaginal™ est destiné à une utilisation chez l'adulte.

8. Contenu de l'emballage de HydralinConfortVaginal™

30mL de gel dans un tube aluminium avec un applicateur en plastique.

Ingédients

Ectoin®, hydroxyéthylcellulose, acide lactique, lactate de sodium, benzoate de sodium, propylène glycol, eau.

9. Fabricant et distributeur

Fabricant (gel) et assemblage



bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten,
Allemagne

Applicateur fabriqué par



Manfred Schägner GmbH
Industriestr. 3
76479 Steinmauern,
Allemagne

Distributeur :

Bayer Healthcare SAS,
33 rue de l'Industrie,
74240 Gaillard
(siège social : Bayer Healthcare SAS, 59000 Lille),
France
n° vert 0 800 87 54 54

10. Date des informations

Octobre 2024

11. Légendes des symboles utilisés sur le carton et les étiquettes



Marquage CE



Fabricant



Consulter les instructions d'utilisation



Période après ouverture : 3 mois



Numéro de lot



Date de péremption



Température de conservation



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé