

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.

Veillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'un COUSSIN BOUEE et dans quel cas est-il utilisé?
2. Comment utiliser le COUSSIN BOUEE?
3. Comment entretenir et conserver le COUSSIN BOUEE?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UN COUSSIN BOUÉE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le COUSSIN BOUEE a pour rôle de faciliter l'assise des patients. Il est indiqué pour le traitement des fissures anales, des crises hémorroïdaires, à la suite d'une épisiotomie, ou après une fracture du coccyx. Il peut également convenir aux personnes souffrantes des lombaires, afin de limiter la pression sur le bas du dos.

Existe en 2 formats : Diamètre 40 cm - Diamètre 45 cm.

2. COMMENT UTILISER LE COUSSIN BOUÉE?

- A. Sortir le coussin de sa boîte.
- B. Ouvrir la valve.
- C. Gonfler le coussin à la convenance du patient, soit à la bouche soit à l'aide d'un insufflateur.
- D. Fermer la valve métallique, en visant vers la droite, jusqu'à rencontrer une faible résistance.

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LE COUSSIN BOUÉE?

Le produit doit être nettoyé en cas de nécessité.

- A. Laver le produit à la main ou en machine, à l'eau tiède « 30° maximum », sans essorage.
- B. Laisser le produit sécher totalement à l'air libre. Ne pas mettre au sèche-linge.
- C. Une fois totalement sec, le produit peut être réutilisé ou stocké.

Le produit doit être stocké en cas de non utilisation.

- A. Dégonfler le COUSSIN BOUEE.
- B. Remettre le produit dans un sachet.
- C. Ranger le produit dans un endroit propre et sec, à température ambiante.



4. MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser pour des personnes dont le poids dépasse 85 Kg.
- Ne pas mettre aux micro-ondes.
- Ne pas mettre en contact direct avec la peau lésée.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

