




Askina® Carbosorb

Pansement Charbon

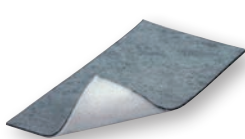

| Ref | Article | Cond. | code EAN 13 | LPPR ¹ | Tarif LPPR/PLV ² |
|-----------|------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 9025070FR | Askina® Carbosorb 10 x 10 cm | 12 | 4046963623388 | 1345557 | 28,62€ |
| 9025078FR | Askina® Carbosorb 10 x 20 cm | 12 | 4046963623401 | 1333436 | 56,22€ |




| | | | |
|--------|------------------------------|---|---------------|
| 400505 | Prontosan® Wound Gel 30 ml | 1 | 4039239517993 |
| 400517 | Prontosan® Wound Gel X 50 g | 1 | 4046964093425 |
| 400508 | Prontosan® Wound Gel X 250 g | 1 | 4046963840174 |
| 400403 | Prontosan® Solution 350 ml | 1 | 4039239517955 |
| 400412 | Prontosan® Solution 40 ml | 6 | 4039239529118 |

NON
REMBOURSE

¹Liste des Produits et Prestations remboursables définie par l'article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale
²Prix Limite de Vente



Prontosan® Solution
Nettoyage immédiat de la plaie

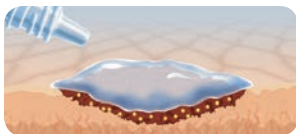

Prontosan® Wound Gel et Wound Gel X
Détersion de dépôts fibrineux

Prontosan®

Dispositif médical de classe III pour le nettoyage, l'humidification et la décontamination des plaies
Organisme notifié : CE(0344)
Fabriqué par B. Braun Medical A.G. | 6204 Sempach | Suisse
Non pris en charge au titre de la LPPR

Askina® Carbosorb

Dispositif médical de classe IIa
Organisme notifié : CE(0050)
Fabriquée par : B. Braun Hospicare Ltd. | Collooney, Co. Sligo | Irlande
Pansement charbon dont la prise en charge est assurée au titre I de la LPPR pour le traitement des plaies malodorantes (notamment cancers ORL, de la peau ou du sein)
Les conditions d'utilisation sont :
- Elimination préalable par débridement chirurgical, enzymatique ou autolytique des tissus secs et nécrosés ;
- Nettoyage de la plaie conformément à un protocole de soins des plaies ;
- Sur des plaies peu exsudatives, imprégnation possible par une solution saline ou d'eau stérile avant application au contact de la plaie ;
- En fonction de l'importance de l'exsudat, utilisation possible d'un pansement secondaire absorbant ;
- Renouvellement du pansement toutes les 24 heures ou plus fréquemment si saturation de la capacité d'adsorption.

Distribués par : B. Braun Medical S.A.S. | RCS Nanterre 562050856 | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bb Braun.fr
B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 €

Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquette avant utilisation
Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et au préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.
Document réservé aux professionnels de santé.
Document et photo non contractuels.
Edition : 02/2014

B. Braun Information Conseil à votre disposition

Appel gratuit : 0 800 51 98 07




Adsorbe les bactéries et les substances malodorantes

Z100916_20140226_20190226

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE


Askina® Carbosorb

Adsorbe les bactéries et les substances malodorantes

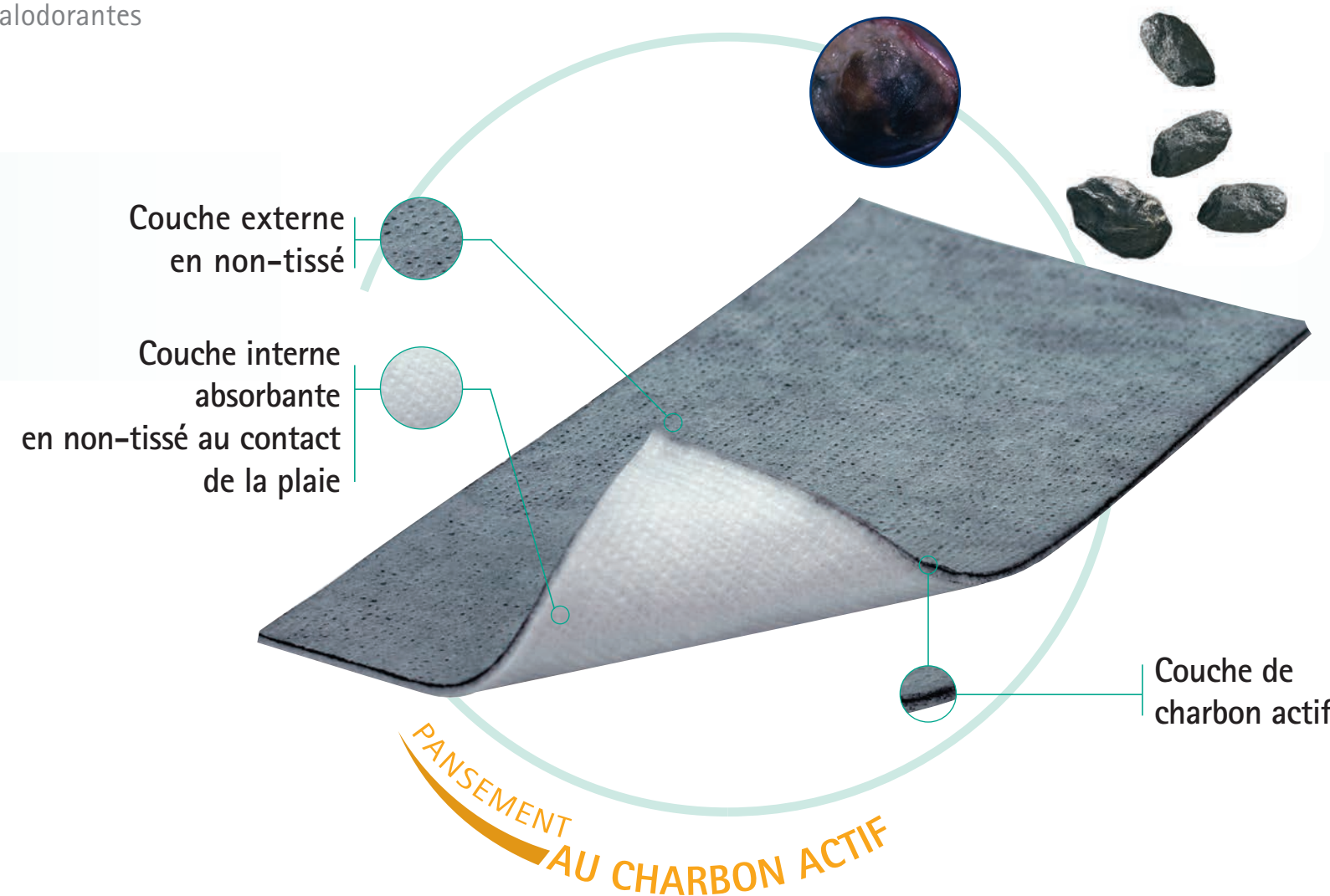

Caractéristiques pratiques¹

- Neutralise les odeurs
- Adsorbe les bactéries
- Absorbe les exsudats

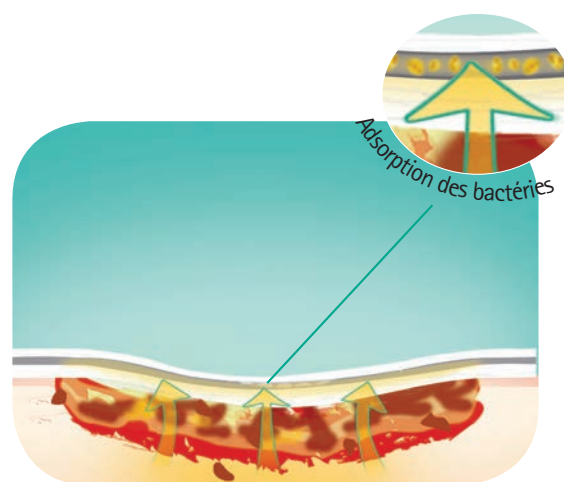

Les bactéries responsables de l'odeur de la plaie (bactéries Gram-) sont attirées à la surface du charbon actif d'Askina® Carbosorb où elles sont retenues. Ainsi filtrées et contrôlées, les mauvaises odeurs de la plaie sont neutralisées.

Indications


- Askina® Carbosorb est pris en charge au titre I de la LPPR² pour les plaies malodorantes, notamment : cancers ORL, de la peau, du sein...

¹Notice

²Liste des Produits et Prestations remboursables définie par l'article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale

Facilité et confort d'utilisation

- Conformable¹
- Découpable

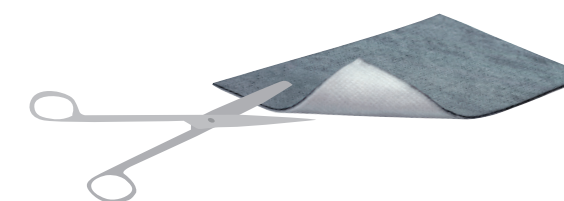

Conseils d'utilisation

1. Nettoyer la plaie avec une solution saline à 0,9% ou une solution appropriée comme Prontosan® Solution
2. Appliquer la couche blanche d'Askina® Carbosorb directement sur la plaie¹
Fixer Askina® Carbosorb avec un pansement secondaire non occlusif¹
Sur des plaies très exsudatives, Askina® Carbosorb peut être combiné avec un pansement absorbant qui doit être placé entre Askina® Carbosorb et la plaie¹
3. Askina® Carbosorb peut rester en place jusqu'à 48 heures selon la quantité d'exsudats¹

