

EAU DE MER ISOTONIQUE

HYGIÈNE DU NEZ

Nettoie et hydrate le nez

Le nez est l'organe responsable de l'odorat et agit comme un filtre naturel pour réduire les impuretés de l'air inhalées (poussières, pollens, pollution, germes, fumée, etc...) et conditionner celui-ci avant qu'il n'atteigne les bronches et les poumons.

Quand le nez est sec ou obstrué, il ne peut plus assurer ses fonctions et les impuretés peuvent provoquer des irritations nasales ou favoriser les rhumes, allergies, rhinosinusites, etc...

Pour préserver cette fonction de filtre protecteur naturel des fosses nasales, il est important de garder une muqueuse nasale propre, décongestionnée et hydratée grâce au lavage régulier du nez.

Qu'est ce que c'est ?

Care+ Eau de mer Hygiène du nez est conseillé chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

Ce produit est indiqué pour un lavage quotidien du nez ou dès l'apparition des premiers symptômes de rhume, rhinite et sinusite. Solution 100% naturelle pour pulvérisation nasale en flacon pressurisé.

Contient une solution d'eau de mer riche en oligo-éléments marins idéale pour :

- **Laver quotidiennement** le nez. Son utilisation régulière, même lorsque le nez n'est pas bouché, protège efficacement contre les rhumes et autres complications.
- **Hydrater** les fosses nasales en cas de sécheresse de la muqueuse nasale (exposition à un environnement très sec).
- **Décongestionner** le nez bouché.
- **Éliminer l'excès de mucus.**
- Fluidifie le mucus pour faciliter le mouchage et prévenir l'apparition de complications.
- Prévenir des réactions allergiques.
- Un lavage nasal après chirurgie endonasale pour les enfants (de plus de 6 ans) et les adultes.

La pression modérée du spray Care+ Eau de mer Hygiène du nez permet un lavage efficace.

Le conditionnement de Care+ Eau de mer Hygiène du nez permet :

D'utiliser le flacon dans toutes les positions pour une meilleure facilité d'utilisation.

D'éviter que le gaz propulseur (air comprimé) ne soit en contact avec la solution et se répande dans les fosses nasales.

Pour qui ?

Conseillé chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans. Pour le lavage quotidien du nez ou dès les premiers symptômes de rhume, rhinite et sinusite. Peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Composition

Eau purifiée et eau de mer naturelle. Sans conservateur.

Date de marquage CE : 2011
AN1387 0003
125 mL
CE
PC-104485-01



Distributeur :
EG LABO - Laboratoires EuroGenetics
Central Park
9-12 Rue Maurice Maïter
92130 Issy-les-Moulineaux
France
CE 0459



Conseils d'utilisation

Pour un lavage quotidien du nez :

1 à 2 pulvérisations dans chaque fosse nasale matin et soir.

Dès les premiers symptômes de rhume, rhinite ou sinusite :

Renouveler les pulvérisations jusqu'à ce que le nez soit complètement débouché, avec au maximum 6 pulvérisations par jour dans chaque fosse nasale.

Pour une utilisation optimale, merci de lire les instructions suivantes :



1- Incliner la tête sur le côté et introduire délicatement l'embout nasal (environ 3 mm) dans la narine

2- Exerger une pression brève et rapide

3- Laisser agir quelques secondes

4- Essuyer le surplus de liquide qui s'écoule de la narine



5- Répéter l'opération dans l'autre narine, en penchant la tête de l'autre côté

6- Se moucher avec un mouchoir

7- Répéter ces étapes si nécessaire jusqu'à ce que le nez soit complètement propre



8- Pour des raisons d'hygiène et pour éviter le risque d'infection, laver l'embout nasal à l'eau après chaque utilisation et le sécher à l'air.

Avertissement

Comme pour tout produit, un risque de réaction allergique existe. En cas de réaction allergique, se rincer le nez et arrêter d'utiliser ce produit.

Un saignement ou une légère douleur après l'utilisation de ce produit peuvent apparaître si la muqueuse nasale est irritée. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Précautions d'emploi

Maintenir hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption qui apparaît sur le flacon. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Récipient pressurisé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer ce produit à des températures supérieures à 50°C. Ne pas percer ni brûler, même lorsque le flacon est vide. Conserver à température ambiante.

Autres produits de la gamme Care + Eau de mer

Care+ Eau de mer Hygiène du nez bébé 125 ml.

Pour les bébés à partir de 3 mois. Contient un embout nasal spécialement adapté au nez des bébés.

Care+ Eau de mer Nez bouché 125 ml.

Pour les adultes. Procure un soulagement efficace de la congestion nasale. Contient des extraits de plantes reconnues pour leurs propriétés calmantes et hydratantes.

**Fabricant :**
Laboratoires Chemineau
93, route de Monnaie
37210 VOUVRAY (France)

Distributeur :
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics
Central Park
9-15 Rue Maurice Mallet
92130 Issy-Les-Moulineaux
France



Dernière mise à jour : 2017-07

Date de marquage CE : 2011

AN1337 0003

125 mL

PC-104465-01

