

DUPRAFLEX®

BANDE MULTI-ÉTALONNÉE

Bandes de compression bi-élastique

sigvaris

Soyez vous-même. Vivez pleinement.

■ BÉNÉFICES PRODUIT

COMPRESSION HOMOGENE⁽¹⁾


L'étalonnage guide le niveau d'étirement et de recouvrement lors de la pose

POSE FACILE⁽¹⁾

ENTRETIEN FACILE⁽²⁾



■ DESCRIPTION DE L'OFFRE

Packaging	Modèles	Taillage	Composition
<p>sigvaris</p>  <p>BANDE MULTI-ÉTALONNÉE MULTI-CALIBRE BAND</p>	<p>① ↓ ② ③ ↓ ④</p> <p>Légère Forte</p>	<p>Largeur : 8 ou 10 cm</p> <p>Longueur : 3m, 3,5m, 4m, 5m</p>	<p>Légère 8cm et 10cm: 92% Polyamide , 7,5% Elasthane, 0,5% Coton</p> <p>Forte 8cm et 10cm : 83,5% Polyamide , 16% Elasthane, 0,5% Coton</p>

■ INDICATIONS

Bande multi-étalonnée légères et fortes :

- Œdème veineux chronique
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé
- Ulcère ouvert
- Prévention de la thrombose veineuse profonde, en cas d'affection veineuse chronique associée (selon la gravité de l'affection veineuse)
- Prévention du syndrome post-thrombotique après Thrombose Veineuse Profonde (TVP) proximale
- Traitement du syndrome post-thrombotique après Thrombose Veineuse Profonde (TVP) (le traitement dépend des manifestations cliniques)
- Lymphoedème

Bande multi-étalonnée forte :

Insuffisance Veineuse Chronique sévère

■ POUR ENTRETENIR VOS PRODUITS



Lavez en machine, programme délicat à 40°



N'utilisez pas d'assouplissant, de chlore ou de solvant



Séchez loin de toutes sources de chaleur

■ TAILLAGE

LARGEUR :

Membre supérieur → **8 cm**

Membre inférieur → **10 cm**

LONGUEUR :

Demi-jambe / Avant-bras → **3 m**

Demi-jambe + Genou → **3,5 m**

Jambe complète / Bras complet → **4 m, 5 m**

DUPRAFLEX

Multi-étalonnée Légère
(Forces 1 et 2)

DUPRAFLEX

Multi-étalonnée Forte
(Forces 3 et 4)

Longueur	LARGEUR		LARGEUR	
	8 cm	10 cm	8 cm	10 cm
3 m	3611610074182	3611610074267	3611610074229	3611610074304
3,5 m	3611610074199	3611610074274	3611610074236	3611610074311
4 m	3611610074205	3611610074281	3611610074243	3611610074328
5 m	-	3611610074298	-	3611610074335

■ TAG

bande de compression, bande allongement long, retour veineux, jambe, bras, compression, ulcère, lymphoedème, TVP

(1) Grâce au système d'étalonnage imprimé sur les bandes (2) Perte de pression inférieure à 20% après 50 lavages à 40°C – tests internes – Novembre 2022. Les bandes de compression multi étalon-nées Dupraflex légères et fortes et/ou la bande anti-œdème Medica, sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Les bandes de compression à allongement court Biaform sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par KOB GmbH. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Pour le bon usage, il convient d'enfiler ou de poser les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche, à l'exception des anti-thrombose qu'il convient de porter de jour comme de nuit dans le cadre de la prévention de la thrombose veineuse profonde. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui :

- Pour les maladies veineuses, contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur

- Pour les maladies lymphatiques, exercent une pression qui améliore le retour lymphatique, réduisant ainsi l'œdème
Bandes Multi étalon-nées Dupraflex : produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Avril 2023 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Dynaven, Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.